

## Ontdek de nieuwe generatie van IMV pistolets!

Sinds de introductie van diepgevroren sperma in inseminatierietjes hebben vele ontwikkelingen elkaar door de jaren heen opgevolgd. Ontwikkelingen op het gebied van rietjes, hulzen en pistolets. Om de kans op een succesvolle inseminatie zo groot mogelijk te maken is het belangrijk de juiste materialen en combinaties van materialen te gebruiken. Combinaties van rietjes, hulzen en pistolets.

Er zijn nogal veel verschillende materialen in gebruik die niet altijd meer de best passende combinaties opleveren. We helpen u graag het beste inseminatie resultaat te realiseren! Op deze pagina treft u het overzicht aan van de verschillende combinaties. Op de andere zijde zijn de "spelregels" voor een succesvolle inseminatie nog eens kort op een rij gezet. Wij hebben er vertrouwen in dat u met de juiste producten en een zorgvuldige werkwijze succesvol kunt insemineren.


Pistolets voor kunstmatige  
inseminatie van runderen

Passend met:

BESTE COMBINATIE

|                                                                                                                                                                                                                                    | Mini Straws<br>(1/4 cc)                                       | Medium Straws<br>(1/2 cc)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TBS pistolet (028409)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beste <b>stijfheid</b> en <b>duurzaamheid</b></li> <li><b>Kleinere diameter</b> speciaal voor Mini Straws</li> <li>Speciaal voor de Top Bull Sheath</li> </ul> | Top Bull Sheath (028215)                                      |                                                               | <b>TBS pistolet + TBS huls</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimaal sperma gebruik</li> <li>Ideaal voor de smalle cervix</li> <li>Precisie in het werk</li> </ul> <b>Nauwkeurigheid</b>                           |
| <b>Kombicolor pistolet (018396-400)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 cm langer</li> <li><b>5 Verschillende kleuren ringen</b></li> <li>Geschikt voor <b>Medium en Mini straws</b></li> </ul>                           | <b>α huls (024485)</b><br>Klassieke Unsplit huls (007496-500) | <b>α huls (024485)</b><br>Klassieke Unsplit huls (007496-500) | <b>Kombicolor + α Sheath of Unsplit huls</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Soepeler insemineren dankzij de speciale ronde kop</li> <li>Eenvoudige plaatsing</li> <li>Veilig product voor veilig gebruik</li> </ul>  |

### Een stukje geschiedenis: de tijdlijn van IMV pistolets

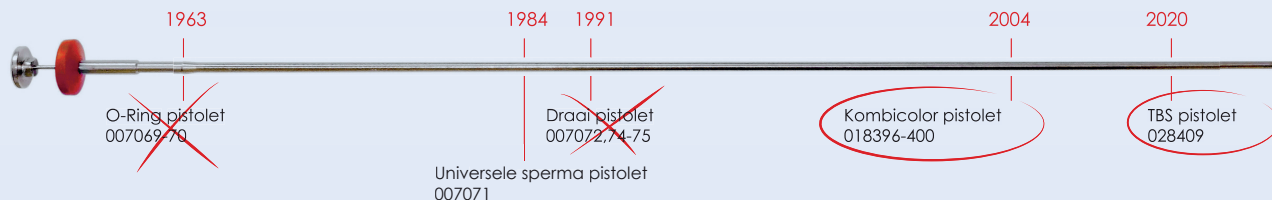


De ergonomie en het veilige sluitsysteem wat gebruikt wordt door de kombicolor en de TBS is wereldwijd erkend door inseminatoren. Hierdoor is de vraag naar O-ring en draai pistolets sterk gedaald, met als gevolg dat deze niet langer geproduceerd worden.

## Kunstmatige inseminatie runderen, juiste werkmethode.


1

Haal het gewenste aantal uit de stikstof container.  
Til de goblet NIET boven de nek van de stikstofcontainer uit.

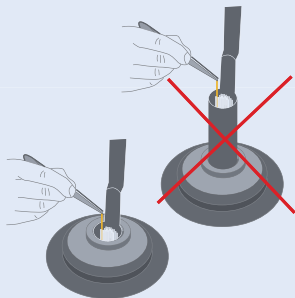


2

Voor alle mini straws geldt:  
Plaats het rietje vlot in een ontdooi apparaat op 37°C, minimaal 21 seconden.

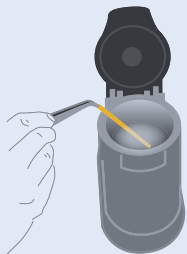


3

Pak de juiste pistolet met bijbehorende mandrijn – Kombicolor, TBS.

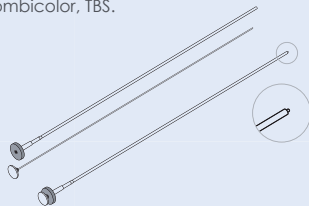


4

Maak de pistolet warm met een stuk tissue of een gunwarmer.

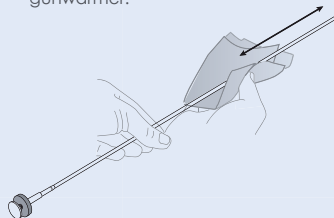


5

Haal het rietje uit het ontdooiapparaat en droog het af (met een tissue).

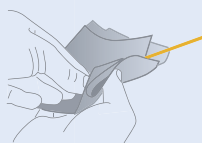


6

Steek het rietje in de pistolet en knip 5mm af, onder een hoek van 90°, bij voorkeur met een rietjesknipper.

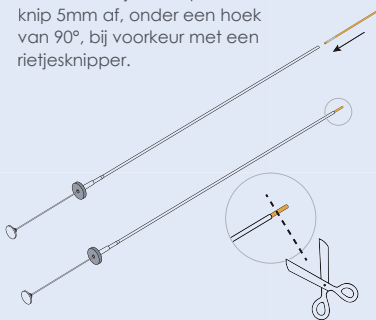


7

Sluit af met een huls: zorg dat het rietje goed vast zit in de tip en dat de huls vergrendeld is aan de pistolet.

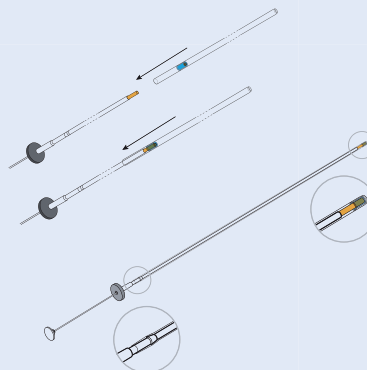

8

Dek het af met een beschermhuls.

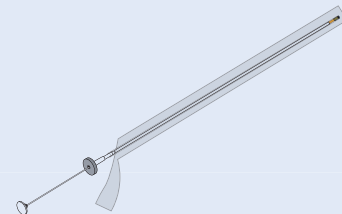

9

Begin voorzichtig af te drukken en breng de sperma-flow in het rietje op gang.



10

**Start met insemineren:** Tijdens het insemineren stopt u met afdrukken zodra de mandrijn weerstand ondervindt.  
**Druk de plug NIET stuk.**

